

# Hoe gebruikt u het histamine buisje



## 1. Het doseerstaafje eruit trekken

Houd het fecesbuisje vast bij de blauwe ring (deze blauwe ring zit vast aan het buisje. Blauwe ring niet draaien of openen). Draai aan het gele doseerstaafje en trek het staafje uit het buisje. Zorg ervoor dat de vloeistof in het buisje blijft!

## 2. Fecesmonster nemen

Prik het gele staafje op drie verschillende plaatsen in de ontlasting. De groefjes aan de punt van het staafje moeten zich met ontlasting vullen.

## 3. Doseerstaafje terugplaatsen

Het gevulde staafje in één keer in het fecesbuisje terugplaatsen. Niet meer eruithalen! Een te veel aan ontlasting wordt op deze manier langs de blauwe ring afgestreeken. Let op: alleen deze kleine hoeveelheid ontlasting, die aan het doseerstaafje zit, hoeft in het fecesbuisje terecht te komen.

## 4. Buisje dichtdraaien

Het staafje nu duidelijk hoorbaar in het buisje vastdraaien. Let op: De vloeistof in het buisje verkleurt praktisch niet. Wanneer u echter met het doseerstaafje het buisje meerdere malen vult, verkleurt de vloeistof bruin, wat betekent dat uw verzoek niet in behandeling kan worden genomen, dan wel u een onjuiste uitslag krijgt!

## 5. Uw barcode sticker op het buisje aanbrengen/controleren

Zorg dat op het buisje een barcode sticker is aangebracht.

